

Electrodes de détection: Conducteurs métalliques entre l'électrode de coagulation utilisée pour détecter les tensions cardiaques provenant du cœur.

Electrode indifférente, dispersive: communément appelée « électrode de retour » ou « électrode patient » ou « plaque de mise ». Plaque de mise ou indifférente de grande surface utilisée pour former le circuit de courant électrique. Habituellement placée sur le dos du patient. L'électrode dispersive, indifférente est connectée au générateur au means du connecteur indifférent.

ABBREVIATIONS

RF : radiofréquence
VAC : vide

GARANTIE LIMITEE

AtriCure® garantit que des dispositions raisonnables ont été prises lors de la conception et de la fabrication de cet instrument. Cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties qui ne sont pas expressément énoncées aux présentes, qu'elles soient expresse ou implicite par l'effet de la loi ou autrement, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. La seule obligation d'AtriCure en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de cet instrument. AtriCure n'assume ni n'autorise aucune autre garantie à assumer en son nom, une autre responsabilité ou une responsabilité supplémentaire en rapport avec cet instrument.

La manipulation, le stockage, le nettoyage et la stérilisation de cet instrument ainsi que d'autres facteurs liés au patient, au diagnostic, au traitement, aux procédures chirurgicales et à d'autres questions indépendantes de la volonté d'AtriCure affectent directement l'instrument et le résultat découlant de son utilisation. AtriCure n'assume aucune responsabilité à l'égard des instruments délibérément mal utilisés ou modifiés, utilisés au-delà de leur durée de vie prévue et ne donne aucune garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité marchande ou l'aptitude à l'usage prévu, à l'égard de tels instruments mal utilisés ou modifiés. AtriCure ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des pertes, dommages ou frais accessoires ou consécutifs découlant directement ou indirectement d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation défectueuse de cet instrument.

MISE AU REBUT

Après utilisation, ce dispositif doit être traité comme un déchet médical et mis au rebut conformément au protocole hospitalier en vigueur.

RETOUR DE PRODUIT UTILISÉ

Si ce produit doit être renvoyé à AtriCure, Inc., un numéro d'autorisation de retour de marchandise (return goods authorization, RGA) doit vous être communiqué par AtriCure, Inc. avant l'expédition. Si le produit a été en contact avec du sang ou des liquides corporels, il faut le nettoyer et le désinfecter soigneusement avant de l'emballer. L'étiquette expédiée dans son carton d'origine ou dans un carton équivalent pour éviter tout dommage pendant le transport et il doit être correctement étiqueté avec un numéro RGA et une indication de la nature du risque biologique que présente le contenu de l'emboî. Les consignes de nettoyage et les matériaux, y compris les contenants d'expédition adaptés, l'étiquetage approprié et le numéro RGA, peuvent être obtenus auprès de AtriCure, Inc.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Il incombe aux utilisateurs de vérifier que ce produit et son bon état avant de l'utiliser. Ils doivent également s'assurer qu'il est utilisé uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi, et notamment qu'il n'est pas réutilisé.

AtriCure, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage, perte ou dépense, indirecte(s) ou entraînant des dommages et intérêts spéciaux, qui résulte d'une mauvaise utilisation ou utilisation défectueuse de ce produit, y compris tout dommage, perte ou dépense liée(s) à des blessures corporelles ou à des dégâts matériels.

AN EXPLANATION OF SYMBOLS ON PACKAGE LABELING / IN EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE

en Refer to the outer package label to see which symbols apply to this product. / En Consulter l'étiquette de l'emballage extérieur pour voir quels symboles s'appliquent à ce produit.

 en Vacuum / à Vide	 en Radiofrequency / à Radiofréquence
 en Perfusion / à Perfusion	 en Manufacture / à Fabricant
 en Catalog number / à Numéro de catalogue	 en Country and Date of Manufacture / à Pays et Date de Fabrication
 en Caution / à Mieux en garde	 en Batch code / à Code de lot
 en Date of use / à Date de perception	 en Model number / à Numéro de modèle
 en Unique Device Identifier / à Identifiant unique de l'appareil	 en Medical Device / à Dispositif médical
 en Do Not Use (if Package is Damaged) / à Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 en Do Not Re-Use / à Ne pas réutiliser
 en Do Not Reuse / à Ne pas réutiliser	 en Single Sterile Barrier System with protective packaging symbol / à Système de barrière stérile simple avec emballage de protection à l'intérieur
 en Follow instructions for use / à Respecter les instructions d'utilisation	 en Single Sterile Barrier System with protective packaging symbol / à Système de barrière stérile simple avec emballage de protection extérieure
 en Moist Electrical and Electronic Equipment / à Équipements d'équipements électriques et électroniques	 en Sterilized using radiation / à Stérilisé par irradiation
 en Diffusion Proof Type of Applied Part / à Type de pièce appliquée CP à l'égouttement de la diffusion	 en Not made with natural rubber latex / à Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
 en Do not contact patients / à Ne contactez pas les patients	 en Non-sterile / à Non stérile
 en Contains hazardous substances / à Contient des substances dangereuses	 en Non-ionizing radiation / à Rayonnement non ionisant
 en Humidity Storage Humidity Limit / à Limite d'humidité pendant le transport/stockage	 en Temperature Storage Temperature Limit / à Limite de température pendant le transport/stockage



AtriCure, Inc.
2555 Innovation Way
Mason, Ohio 45040 USA
+1 866.349.2342
+1 513.753.4100